

# VENAPORTA® Cerrahi Felt

## Cerrahi Felt (Keçe), Pledget (Plejit), Strip (Şerit), Tape (Teyp, Askı) Kullanma Kılavuzu

### Ürün

**Kullanılan Malzemeler:** Ürün; Politetrafloroetilen (PTFE) ya da Polyester (PE/PES) fiberlerden veya Polyester ve ePTFE'nin bileşimi olan Kompozit (Çift Yüzlü/Bileşik) materyallerden üretilmiştir. Cerrahi Feltler çeşitli boyutlarda, geçirgenliklerde ve kalınlıklarda üretilebilmektedir. Sıklıkla, en küçük ebatlarına "Plejit", düz şeritlerine "Strip", düz örgülü şeritlerine ise "Teyp(Askı)" adı verilmektedir.

### Ürün Grupları

PTFE Keçe, Plejit, Şerit, Teyp (Askı)

Polyester Keçe, Plejit, Şerit, Teyp (Askı)

Kompozit Keçe, Plejit, Şerit, Teyp (Askı)

Süturlu Keçe/Plejit

**Sterilite:** Cerrahi Felt'ler teslim edilmeden önce Etilen Oksit ile steril edilir ve paketleri açılmadığı veya zarar görmediği sürece steril ve apirojen kalır. Ürün sadece **bir defa** kullanılabilir. Bu ürünün ikinci kez kullanılması enfeksiyon ve hatta ölüme neden olabilecek komplikasyonlara ve kontaminasyonlara sebep olabilir.

### Önerilen Teknikler

**Ürünün Bakımı :** Cerrahi Felt'lerin serin ve kuru bir ortamda saklanması gerekmektedir. Son kullanma tarihi ürün etiketinde ve kutusunda yer almaktadır. Olası komplikasyonları önlemek için **ürünün son kullanma tarihinden önce kullanılması gereklidir.** Cerrahi Felt'i paketinden nazik bir şekilde çıkarınız ve Felt'e sadece **steril eldiven veya atravmatik aletler kullanarak elleyiniz.** Eğer ürün ve/veya ürün paketi zarar görmüşse ürünü **kullanmayınız.**

**Ürünün kullanım amacı :** Cerrahi Felt, Plejit ve Strip'ler genel olarak kardiyak ve vasküler cerrahide implant olarak kullanılmaktadır. Feltler plejit olarak veya ventriküler miyokard segmentlerini bir yama olarak oluşturmak için kullanılabilir. Plejitler vasküler veya miyokart kapatması, septal veya hepatik onarım veya valvüler dikiş için kullanılabilir.

PTFE veya polyester cerrahi askılar ise doku yaklaşımı, retraksiyon veya bir ligatür olarak kullanılabilir. Teyp (Askı), damar retraksiyonu (forseps ile damarları ayırma, işaretleme, kaldırma veya çekme), sinir retraksiyonu ve tendon retraksiyonu amacıyla kullanılabilir. Teyp (Askı) 24 saatten daha kısa süre vücutla temas etmeli ve ameliyattan sonra atılmalıdır.

Bu ürünlerin tüm çeşitleri için yanlış kullanım veya belirtilmiş uygulamalar dışında kullanımı **ciddi komplikasyonlara** neden olabilir.

**Dikiş:** Sadece resorbe olmayan suture ve uygun bir iğne kullanınız. Resorbe olan suture kullanımı bu ürün için **uygun değildir** ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

**Olası Komplikasyonlar:** Aşağıdaki önlemler izlenmezse enfeksiyon, inflamasyon, hematoma, tromboz ve aşırı kanama gibi bir dizi komplikasyon ortaya çıkabilir.

**Endikasyonlar:** Cerrahi Felt (Keçe), Plejit, ve Strip ürünleri genel, kardiyak ve vasküler cerrahi için kullanılmaktadır. Felt'ler; suture altında dikiş desteği veya yama olarak kullanılabilir.

Teyp (Askı), damar retraksiyonu (forseps ile damarları ayırma, işaretleme, kaldırma veya çekme), sinir retraksiyonu ve tendon retraksiyonu amacıyla kullanılabilir.





















**Kontrendikasyonlar:** Bu ürünün bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

**Sorumluluk:** Ürün yalnızca kabul görmüş kardiyovasküler cerrahi teknikleri olan profesyonel bir cerrah tarafından kullanılmalıdır. Tüm önlemlere uyulmalıdır. VENAPORTA®, ürünün yanlış kullanımından sorumlu değildir.

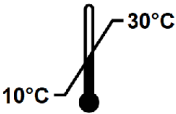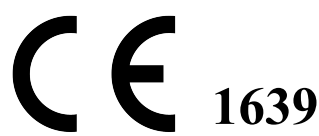

## Genel Önlemler

- **Sadece** steril eldiven atravmatik aletler ile kullanınız.
- Rezorbe suture **kullanmayınız**.
- Keskin iğne **kullanmayınız**.
- Cerrahi Felt'i kontamine **etmeyiniz**.
- Cerrahi Felt'in yüzeyini fazla manipüle **etmeyiniz**.
- Kullanım sırasında Cerrahi Felt'e zarar **vermeyiniz**.
- Son kullanma tarihi geçmiş ise Cerrahi Felt'i **kullanmayınız**.
- Tek kullanımlıktır, ikinci kez **kullanmayınız**.
- Tekrar steril **etmeyiniz**.

 Tek Kullanımlıktır.	 Etilen Oksit İle Steril Edilmiştir.	 Güneş Işığında Koruyunuz.	 Paket Zararlı Görmüşse Kullanmayınız!
 Tekrar Steril Etmeyiniz.	 Lot Numarası	 Kuru Tutunuz.	 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Uyarılar!
 Tek Steril Bariyer Sistemi	 İçinde Koruyucu Ambalajı Bulunan Tek Steril Bariyer Sistemi	 Tıbbi Cihaz	 Tekil Cihaz Kimliği
 Kullanmadan Önce Kullanma Kılavuzunu Okuyunuz!	 Ürün Referans Numarası	 10°C - 30°C 10°C ile 30°C arasında saklayınız.	
 Üretim Tarihi	 Son Kullanma Tarihi	 Üretici Firma	
 Adet			

# Venaporta

VENAPORTA Tıbbi Malzemeler İmalat-İthalat-İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.  
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Öz Anadolu Sanayi Sitesi 1453. Sokak No:3/2  
İVOGSAN Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE  
Tel: +90 (312) 394 24 05-06 / Faks: +90 (312) 394 24 10  
[info@venaporta.com](mailto:info@venaporta.com) [www.venaporta.com](http://www.venaporta.com)